

INSTRUÇÕES DE USO

LENÇO/COMPRESSA ABSORVÍVEL DESCARTÁVEL PARA BANHO DE LEITO

NOTA IMPORTANTE:

O número da revisão das Instruções de Uso indicado no rótulo do produto deve ser o mesmo deste documento.

Caso deseje obter as Instruções de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (41) 3403-4206 ou pelo e-mail: contato@lmsbiomedical.com.br

Visite o nosso site para conhecer os nossos produtos: <https://www.lmsbiomedical.com.br>

DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO:

Nome técnico: Compressas

A linha de Lenços/Compressas Absorvíveis Descartáveis para Banho de Leito da LMS Biomedical é fabricada em tecido composto por 70% viscose e 30% poliésteres com tecnologia *spunlace*.

Os Lenços/Compressas foram desenvolvidos para dar mais conforto, resistência e máxima absorção a todos os seus usuários. Estão disponíveis na cor branca, nas gramaturas de 50 e 60 g/m² e em diversos tamanhos.

INDICAÇÃO, FINALIDADE OU USO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Lenços/Compressas para banho de leito.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

Condições de Uso: Não reutilizar este produto. Produto de uso único e descartável após o uso. Produto de reprocessamento proibido. Não utilize o se a embalagem estiver danificada, aberta ou úmida.

Cuidados no Armazenamento e Transporte: Armazenar e transportar este produto em local limpo, seco, arejado e protegido da luz solar, vapores químicos e umidade. Temperatura de armazenamento entre 4 e 32°C.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Os produtos são embalados em saco plástico contendo 50 e 100 unidades.

Modelos Comerciais:

Dimensões: 25 x 40; 50 x 40; 50 x 70; 25 x 20 e 30 x 40cm

Gramaturas: 50 a 60g/m²

Composição:

70% Viscose e 30% Poliéster 30% com tecnologia *spunlace*.



MODO DE USAR:

- 1: Retirar um lenço/compressa da embalagem.
- 2: Colocar o lenço/compressa sobre a superfície com líquido a ser absorvido.
- 3: Comprimir sobre a superfície a ser absorvida (enxuta)
- 4: Após o término do procedimento, o lenço/compressa deverá ser descartado.

IMPORTANTE: O lenço/compressa funciona por absorção, portanto não é necessário arrastar o produto sobre a superfície.

Validade: 3 anos após a fabricação.

Lote e Data de Fabricação: Vide embalagem.

NÃO ESTÉRIL. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESCARTÁVEL APÓS O USO. PRODUTO DE REPROCESSAMENTO PROIBIDO.

Fabricado por:

LMS Biomedical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Mandaguaçu, nº 534, Loja C, Emiliano Pernetá, Pinhais/PR, CEP: 83.324-430

SAC (41) 3403-4206 – contato@lmsbiomedical.com.br

CNPJ: 19.281.319/0001-60 – Indústria Brasileira

Resp. Técnica: Fernanda Caroline Félix – CRO/PR 30.602

Notificação ANVISA nº: ISENTO